

はじめに

動作環境

PCをお使いの方

Windows デスクトップPC



画面解像度 1024 x768以上

対応OS Windows8.1 以降

対応ブラウザ

-  Google Chrome 最新バージョン(推奨ブラウザ)
-  Microsoft Edge 最新バージョン

※Internet Explorerでは正常に動作しない可能性があります。
上記ご案内の対応ブラウザをご利用ください。

Windows ノートPC



iPad



対応OS iOS 12.0 以降

対応ブラウザ  Safari最新バージョン

Android



対応OS Android 6.0 以降

対応ブラウザ  Google Chrome 最新バージョン

タブレットをお使いの方

※OS、ブラウザのバージョンが古い場合はバージョンアップしてください。

※お使いのOS、ブラウザバージョンはインターネットで簡単にお調べいただけます。

検索例)

iPadのOSのバージョンがわからない場合

iPad OS バージョン確認方法



chromeのバージョンがわからない場合

chrome バージョン確認方法



ログイン、端末認証



SHINRI
シンリシリーズ

ID

パスワード

ログイン



SHINRI
シンリシリーズ


端末認証

端末登録を行う必要があります。

端末ID

登録 キャンセル

1. タブレット・パソコンの電源を入れます。
2. インターネットにつながっていることを確認し、ブラウザを起動したら、下記のURLを入力します。
<https://p.d-cloud.jp/dcnavi/>
3. 上の画面が出たら、ログインIDとパスワード（利用開始案内の2枚目に記載）を入力し、ログインします。

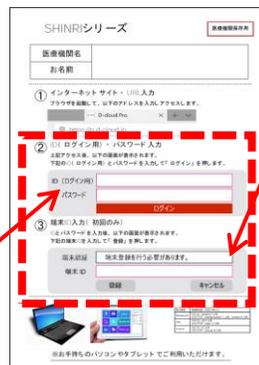

4. 端末IDの入力を求められるので、端末ID（利用開始案内の2枚目に記載）を入力し、登録します。

※ 1 端末につき 1 ID です。複数の端末をお使いになる場合は、都度、登録が必要です。

※ 1 施設 5 端末まで追加料金なくご使用いただけます。2 端末目以降の追加IDをご希望の方は、当社営業担当までお問合せ下さい。

★ご注意★

2 回目のログイン以降、使用間隔があくとブラウザの機能上自動ログインできなくなります。その際はログインIDとパスワードを入力の上、再度ログインして下さい。

情報管理に配慮した上で、ログインIDとパスワード、端末IDが確認できる状態でご使用下さい。

例) 職員証の中に入れておく

初めての検査までに

SHINRIシリーズで検査をする準備として、下記のステップに従って登録を行ってください。

①検査者登録

検査を行う「検査者」を登録します。
📖p10

②被検査者登録

検査を受ける「被検査者」を登録します。
📖p15

③処方入力

「被検査者」の処方情報を入力します。
※**処方**は後で入力しても構いません。
📖p22

④検査練習

各検査メニューに「検査練習」があります。
初めての方は、練習してから検査実施することをお勧めします。

SHINRI-HASEGAWA ⑤ SHINRI-BEHAVE SHINRI-ADAS

各検査を実施します。

⑤



メインメニューボタンの機能



- ① 検査実施の留意事項、操作マニュアルをご覧になれます。
- ② 被検査者の処方情報の入力ができます。👉p22
- ③ 検査を受ける「被検査者」の登録ができます。👉p15
- ④ 検査を行う「検査者」の登録ができます。👉p10
- ⑤ 分析メニューに移動します。👉p52
- ⑥ 管理メニューに移動します。👉p8
- ⑦ 各検査の実施メニューに移動します。
- ⑧ SHINRIシリーズに関するお知らせが表示されます。

管理メニュー



- ①各種お問い合わせができます。
- ②「ADAS-Jcog.検査用紙」「同意書」「HDS-R項目詳細」のダウンロードができます。
- ③利用明細の確認ができます。
- ④利用規約の確認ができます。
- ⑤検査時の入力に「キーパッドを表示する」かどうかを設定できます。
- ⑥データ管理オプションの追加について確認できます。
- ⑦ログアウトします。

ログアウト



SHINRIシリーズをご利用になるには、施設のログイン・端末認証 (p5) をした上で、検査者ログイン (p11) をします。
ログインしているのとは異なるIDで作業を進める場合は、一旦ログアウトする必要があります。
ログアウトするには「管理」をクリックします。



「管理メニュー」の「ログアウト」をクリックすると、ログアウトします。