

はじめに

動作環境

PCをお使いの方



Windows デスクトップPC



画面解像度 1024 x768以上

対応OS Windows8.1 以降

対応ブラウザ

-  Google Chrome 最新バージョン(推奨ブラウザ)
-  Microsoft Edge 最新バージョン

Windows ノートPC



※Internet Explorerでは正常に動作しない可能性がございます。
上記ご案内の対応ブラウザをご利用ください。

タブレットをお使いの方

iPad



対応OS iOS 12.0 以降

対応ブラウザ

-  Safari最新バージョン

Android



対応OS Android 6.0 以降

対応ブラウザ

-  Google Chrome 最新バージョン

※OS、ブラウザのバージョンが古い場合はバージョンアップしてください。

※お使いのOS、ブラウザバージョンはインターネットで簡単にお調べいただけます。

検索例)

iPadのOSのバージョンがわからない場合

iPad OS バージョン確認方法



chromeのバージョンがわからない場合

chrome バージョン確認方法



ログイン、端末認証



SHINRI
シンリシリーズ

ID

パスワード

ログイン



SHINRI
シンリシリーズ

端末認証


端末登録を行う必要があります。

端末ID

登録

キャンセル

1. タブレット・パソコンの電源を入れます。
2. インターネットにつながっていることを確認し、ブラウザを起動したら、下記のURLを入力します。
<https://p.d-cloud.jp/dcnavi/>
3. 上の画面が出たら、ログインIDとパスワード（利用開始案内の2枚目に記載）を入力し、ログインします。

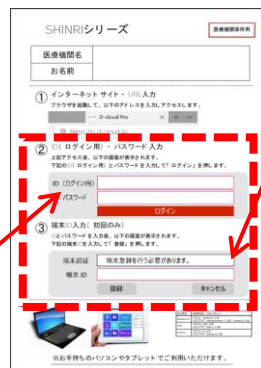

SHINRIシリーズ

医療機関名
科名

① インターネット接続・サイト・URL入力
ブラウザを起動して、以下のURLを入力してください。

② ログイン用ID・パスワード入力
以下のURLを入力し、ログインしてください。

③ 端末ID入力（初期のみ）
このIDを入力し、端末登録を行います。

端末ID

端末登録を行う必要があります。

登録

キャンセル

4. 端末IDの入力を求められるので、端末ID（利用開始案内の2枚目に記載）を入力し、登録します。

※ 1 端末につき 1 ID です。複数の端末をお使いになる場合は、都度、登録が必要です。

※ 1 施設 5 端末まで追加料金なくご使用いただけます。2 端末目以降の追加IDをご希望の方は、当社営業担当までお問合せ下さい。

★ご注意★

2 回目のログイン以降、使用間隔があくとブラウザの機能上自動ログインできなくなります。その際はログインIDとパスワードを入力の上、再度ログインして下さい。

情報管理に配慮した上で、ログインIDとパスワード、端末IDが確認できる状態でご使用下さい。

例) 職員証の中に入れておく

初めての検査までに

SHINRIシリーズで検査をする準備として、下記のステップに従って登録を行ってください。

①検査者登録

検査を行う「検査者」を登録します。
📖p10

②被検査者登録

検査を受ける「被検査者」を登録します。
📖p15

③処方入力

「被検査者」の処方情報を入力します。
※**処方**は後で入力しても構いません。
📖p22

④検査練習

各検査メニューに「検査練習」があります。
初めての方は、練習してから検査実施することをお勧めします。

SHINRI-HASEGAWA ⑤ SHINRI-BEHAVE SHINRI-ADAS

各検査を実施します。

⑤



メインメニューボタンの機能



- ① 検査実施の留意事項、操作マニュアルをご覧になれます。
- ② 被検査者の処方情報の入力ができます。👉p22
- ③ 検査を受ける「被検査者」の登録ができます。👉p15
- ④ 検査を行う「検査者」の登録ができます。👉p10
- ⑤ 分析メニューに移動します。👉p52
- ⑥ 管理メニューに移動します。👉p8
- ⑦ 各検査の実施メニューに移動します。
- ⑧ SHINRIシリーズに関するお知らせが表示されます。

管理メニュー



- ①各種お問い合わせができます。
- ②「ADAS-Jcog.検査用紙」「同意書」「HDS-R項目詳細」のダウンロードができます。
- ③利用明細の確認ができます。
- ④利用規約の確認ができます。
- ⑤検査時の入力に「キーパッドを表示する」かどうかを設定できます。
- ⑥データ管理オプションの追加について確認できます。
- ⑦ログアウトします。

ログアウト



SHINRIシリーズをご利用になるには、施設のログイン・端末認証 (p5) をした上で、検査者ログイン (p11) をします。
ログインしているのとは異なるIDで作業を進める場合は、一旦ログアウトする必要があります。
ログアウトするには「管理」をクリックします。



「管理メニュー」の「ログアウト」をクリックすると、ログアウトします。

検査者登録

検査者の登録

SHINRIシリーズをご利用になるには、施設のログイン・端末認証（p5）をした上で検査者ログインをする必要があります。そのため、初めてお使いになるときはそれぞれ検査者登録をしてください。

STEP1



新たに検査者を登録するには、スタート画面の「検査者入力」をクリックします。

STEP2

検査者入力メニュー



「検査者 新規登録」ボタンをクリックします。

STEP3

検査者を選択し、パスワードを入力してください。

検査者登録をするにあたって、まず検査者ログインをします。

※ここで入力した検査者識別コードで検査者ログインをしている状態になります。

SHINRIシリーズを初めてご使用になる場合は、「初期検査者識別コード」を選択し、初期パスワードを入力して決定ボタンをクリックします。

- ・初期検査者識別コード = 初期設定用
- ・パスワード = 初期パスワード

既に登録している検査者識別コードがある場合は、該当する識別コードを選択してパスワードを入力し、決定ボタンをクリックします。



初期設定用、初期パスワードは、ご利用開始案内の3枚目をご確認ください。

STEP4

検査者識別コードを入力して「登録」にタッチしてください。

検査者	検査者ID	※ 登録後に決定します。	検査者を特定出来るような文字列を入力してください。 例)「従業員コード」等
	検査者識別コード	012345	

キャンセル

登録

上の画面が出たら、任意の「検査者識別コード」を入力します。

- ・英数字4字以上でご登録ください。
- ・従業員コードや社員番号など、院内で任意に設定してください。
- ・生年月日など個人を特定できるものはお控えください。

検査者識別コードを入力したら、登録ボタンをクリックします。

STEP5

検査者の登録が完了しました。

検査者	検査者ID	501217
	検査者識別コード	012345

検査者の登録が完了しました。

検査者IDは自動で設定されます。

「終了してメニューに戻る」をクリックします。

※以後、検査者ログインは検査者識別コードを選択して行います。

※検査者パスワードは、初めて検査をする際に設定します。

終了して
メニューに戻る


検査者パスワードの設定

STEP1



検査メニューに移動します。

STEP2

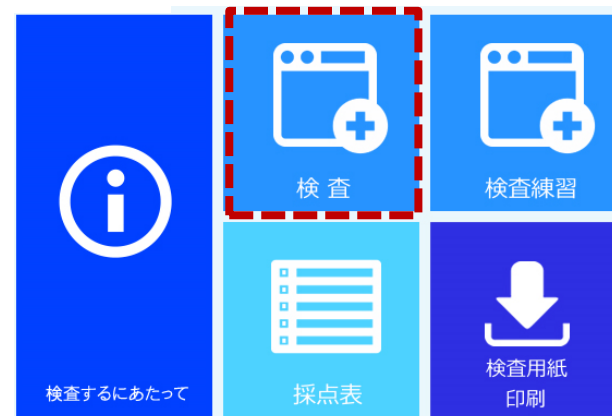

「検査」をクリックして検査を始めます。

STEP3

A screenshot of a web form for password setting. The form is titled '検査者を選択し、パスワードを入力してください。' (Select inspector and enter password). It has a dropdown menu for '検査者' (Inspector) with the value '[501218] 11111' and a password field. A '決定' (OK) button is next to the password field. Below this, a message says 'ログインしていません。' (Not logged in). The main part of the form is titled '検査者のパスワードが未設定です。パスワードを設定してください。' (Inspector's password is not set. Please set the password). It has a dropdown menu for '検査者' (Inspector) with the value '[501218] 11111', a 'パスワード' (Password) field, and a 'パスワード確認' (Confirm password) field. '決定' (OK) and 'キャンセル' (Cancel) buttons are at the bottom.

新たに登録した検査者識別コードで初めて検査者ログインする時、パスワード設定画面が開きます。
ここでパスワードを設定します。

被検査者の登録

STEP1



新たに被検査者を登録するには、
スタート画面の「被検査者入力」をクリックします。

STEP2



「被検査者 新規登録」をクリックします。

STEP3

検査者を選択し、パスワードを入力してください。

検査者	検査者識別コード	検査者を選択してください▼
	パスワード	●●●●

ログインしていません。

被検査者を登録するには、まず検査者ログインをします。
検査者を選択し、パスワードを入力します。

※初めてログインする場合はパスワード設定画面が表示されます。(👉p14)

※既に検査者ログインをしている場合、この画面は表示されません。

被検査者情報として各項目を入力してください。

STEP4

情報を入力して「登録」にタッチしてください。

DcDID ※ 登録後に決定します。

① 被検査者ID

性別 女性

② 生年月日 西暦 (和暦)年 月 日 (-歳)

③ DAT発症時期 年 月 時期が曖昧な場合

④ MCI発症時期 年 月 時期が曖昧な場合

喫煙

飲酒

最終学歴

主たる介護者

同居者

既往歴

既往歴

申告値

血圧

血糖値

コレステロール

同意書

内容 被検査者の同意 同意取得済み ※ 添付の同意書に記入後保管してください。

①「被検査者ID」は数字のみを入力してください。カルテ番号など院内で管理できる数字を記入します。

②生年月日は、西暦か和暦のいずれかを入力します。

③「DAT発症時期」は認知症の症状が出始めた時期を入力します。

- ・ 発症時期が曖昧な場合は「時期が曖昧な場合」ボタンをタッチし、何年前のいつ頃（季節）かを入力します。
- ・ 「解説」「内容」ボタンのクリックで解説や説明を表示します。

④「MCI発症時期」はMCIの診断がついている方のみ入力します。

- ・ MCI診断のない方はスキップしてください。

⑤「被検査者の同意」は、検査を実施することと検査結果をお預かりすることへの同意です。同意を取得したら「同意取得済み」にチェックを入れます。

- ・ 同意書はフォーマットをあらかじめダウンロードしてお使いください。

※1 「MCI発症時期」以外のすべての項目を入力してください。

※2 同意は検査前に必ず取得してください。

同意が得られないと、検査を始めることができません。



STEP5

基本情報	DcDID	※ 登録後に決定します。		顧客番号やお薬手帳番号など、施設内の固有番号で、且つ、個人を特定しない任意の番号を設定してください。		
	被検査者ID	12345				
	性別	女性				
	生年月日	1936 (昭和 11) 年 4 月 2 日 (83歳)				
	解説	DAT発症時期	2013 年 3 月		時期が曖昧な場合	DAT発症時期は初めての診察日ではありません。 解説をご参照ください。
	解説	MCI発症時期	年 月		時期が曖昧な場合	
		喫煙	しない			
		飲酒	時々			
		最終学歴	旧学制 高等女学校(実科高女)			
		主たる介護者	あり		女性	子
既往歴	同居者	あり				
	既往歴	あり	<input type="checkbox"/> 精神疾患 <input checked="" type="checkbox"/> 脳血管障害 <input type="checkbox"/> その他			
申告値	血压	普通				
	血糖値	正常				
	コレステロール	正常				
同意書	内容	被検査者の同意 <input checked="" type="checkbox"/> 同意取得済み ※添付の同意書に記入後保管してください。				

キャンセル

登録

被検査者の登録情報を確認します。

すべてを入力して「登録」をクリックすると、被検査者登録は完了です。

被検査者情報の表示/更新

被検査者情報の確認や更新をしたいときは、以下に沿って操作します。

STEP1

被検査者入力メニュー



「被検査者 表示/更新」をクリックします。

STEP2

被検査者一覧 (詳細表示/更新)

DcDIDまたは被検査者ID 絞り込み

	DcDID	被検査者ID	性別	生年月日	年齢	更新日
<input type="button" value="表示"/> <input type="button" value="更新"/>	500502	0226	女性	1932/02/26	89歳	2021/02/26
<input type="button" value="表示"/> <input type="button" value="更新"/>	500496	0824	女性	1993/02/09	28歳	2021/02/08
<input type="button" value="表示"/> <input type="button" value="更新"/>	500489	12345678	女性	1970/07/03	50歳	2021/01/04
<input type="button" value="表示"/> <input type="button" value="更新"/>	500487	123456789	女性	1935/09/06	85歳	2020/12/25
<input type="button" value="表示"/> <input type="button" value="更新"/>	1	テスト被検査者	女性	1950/12/01	70歳	2020/05/22
<input type="button" value="表示"/> <input type="button" value="更新"/>	500459	123456	男性	1940/10/22	80歳	2020/05/13
<input type="button" value="表示"/> <input type="button" value="更新"/>	500442	111-1	女性	1938/02/11	83歳	2019/11/26
<input type="button" value="表示"/> <input type="button" value="更新"/>	500441	111	男性	1940/06/29	80歳	2019/11/26
<input type="button" value="表示"/> <input type="button" value="更新"/>	500127	11	女性	1911/01/01	110歳	2017/06/07

「表示」「更新」どちらかをクリックします。

「表示」：被検査者の登録情報ご確認ができます。

「更新」：情報の変更や修正ができます。

STEP3

表示

被検査者の詳細表示

DcDID	500127
被検査者ID	11
性別	女性
生年月日	1911(明治44)年1月1日 (110歳)
DAT発症時期	2011年5月頃
MCI発症時期	2017年2月頃
喫煙	しない
飲酒	時々
最終学歴	女子高等師範学校
主たる介護者	女性・子
同居者	あり

終了して
被検査者一覧に戻る

被検査者情報が確認できます。
「終了して被検査者一覧に戻る」クリックで
一覧に戻ります。

更新

被検査者更新

情報を入力して「更新」にタッチしてください。

DcDID	500127	<small>顧客番号やお薬手帳番号など、施設内の固有番号で、目 づ、個人を特定しない任意の番号を設定してください。</small>	
被検査者ID	11		
性別	女性		
生年月日	1911 (明治 44) 年 1 月 1 日 (110歳)		
解説	DAT発症時期	2011 年 5 月 <small>時期が 曖昧な場合</small>	<small>DAT発症時期は初めての診察日 ではありません。 解説をご参照ください。</small>
解説	MCI発症時期	2017 年 2 月 <small>時期が 曖昧な場合</small>	
喫煙	しない		
飲酒	時々		
最終学歴	旧学制 女子高等師範学校		
主たる介護者	あり 女性 子		
同居者	あり		

キャンセル

更新

被検査者情報の更新ができます。
すべて入力し終えたら「更新」をクリックし
ます。

処方入力

処方入力

被検査者の処方情報を入力するには、以下に沿って操作します。
抗認知症薬の薬効評価をするためにも処方情報の入力大切です。

STEP1



スタート画面の「処方入力」をクリックします。

STEP2

検査者を選択し、パスワードを入力してください。

検査者	検査者識別コード	検査者を選択してください▼
	パスワード	●●●●

ログインしていません。

検査者を選択し、パスワードを入力します。
既に検査者ログインをしている場合、この画面は表示されません。

STEP3

被検査者を選択して「決定」にタッチしてください。

検査者	検査者ID	501218
	検査者識別コード	11111

DcDIDまたは被検査者ID

絞り込み

クリア

	DcDID	被検査者ID	性別	生年月日	年齢	更新日
<input type="radio"/>	2	テスト被検査者	女性	1950/12/01	69歳	2019/05/29
<input type="radio"/>	525260	001	女性	1940/05/16	79歳	2019/05/16
<input type="radio"/>	525262	10101	女性	1931/04/06	88歳	2019/05/16
<input type="radio"/>	523883	20190101	女性	1950/01/01	70歳	2019/04/26

テスト検査として実施される場合の被検査者IDは
「テスト被検査者」を選択してください。

処方入力をしたい被検査者を選択し、「決定」をクリックします。

STEP4

被検査者を確認して「決定」にタッチしてください。

検査者	検査者ID	501218
	検査者識別コード	11111
被検査者	DcDID	525260
	被検査者ID	001
	性別	女性
	生年月日	1940(昭和15)年5月16日 (79歳)
	DAT発症時期	2016年8月頃
	MCI発症時期	-
	喫煙	しない
	飲酒	時々
	最終学歴	専門学校

戻る

決定

被検査者情報の確認画面です。
間違いがなければ「決定」をクリックします。

STEP5

処方情報入力

処方情報入力

抗認知症薬の情報を入力してください。

被検査者 DcDID 500546
被検査者ID 010101

① 最初に処方された抗認知症薬は？ あり なし アリセプト

② いつ頃に処方されましたか？ 2020年 10月 時期が曖昧な場合

③ 途中で中断しましたか？ した しない

1) それはいつ頃ですか？ 年 月 時期が曖昧な場合

戻る 登録

抗認知症薬の処方歴（登録日までの情報）を入力します。
入力し終わったら「登録」をクリックします。

上の画面は、処方情報を入力していない場合に表示されます。

STEP6

処方情報入力

抗認知症薬の情報を入力してください。

被検査者 DcDID 500546
被検査者ID 010101

		2022年						
		8	9	10	11	12	1	2
1.アリセプト								
	<							

今日 < > 日単位で表示する

戻る 新規処方入力 終了して
トップメニューに戻る

STEP5の入力内容がカレンダーに反映されています。

この情報は、登録日までの情報です。

登録日以降の処方情報を入力するには、「新規処方入力」をクリックします（p27）。

処方情報の入力を後でしたい場合は、「終了してトップメニューに戻る」をクリックしてください。

STEP7

処方情報入力

抗認知症薬の情報を入力してください。

処方情報の登録

処方日	薬剤	剤形	1日用量	日数
2022年 1月 1日	アリセプト	錠	5	
▼年 ▼月 ▼日	▼	▼	▼	▼
▼年 ▼月 ▼日	▼	▼	▼	▼
▼年 ▼月 ▼日	▼	▼	▼	▼
▼年 ▼月 ▼日	▼	▼	▼	▼
▼年 ▼月 ▼日	▼	▼	▼	▼

7 8 9 Back
4 5 6 クリア
1 2 3 閉じる
0 .

登録 キャンセル

戻る 新規処方入力 終了して
トップメニューに戻る

処方情報の登録ウィンドウで、処方開始日、用法用量、処方日数を確認、入力します。
他にも処方がある場合や、内容を修正したい場合も、このウィンドウで入力・修正することができます。

入力し終わったら「登録」をクリックします。

STEP8

処方情報入力

抗認知症薬の情報を入力してください。

被検査者 DeDID 500546
被検査者ID 010101

	2022年								
月	8	9	10	11	12	1	2		
1.アリセプト									
2.メモリー	未入力								
	<								

今日 < > 日単位で表示する

戻る 新規処方入力 終了して
トップメニューに戻る

処方内容の登録が完了し、内容が反映されました。
「終了してトップメニューに戻る」をクリックします。

簡易処方入力方式について

簡易処方入力方式をご希望の方は「お問い合わせフォーム」よりご連絡下さい。

STEP6'

	薬剤	開始	終了
削除 更新	メマリール錠 1mg	2020-11-11	処方中
削除 更新	アリセプト錠 5mg	2020-10-30	処方中

「追加」を押すと処方情報を追加できます。
「更新」を押すと処方情報を編集できます。

STEP7'

必要事項を入力し、「OK」をクリックします。


SHINRI-ADAS

STEP1



「SHINRI-ADAS」を
クリックします。

STEP2

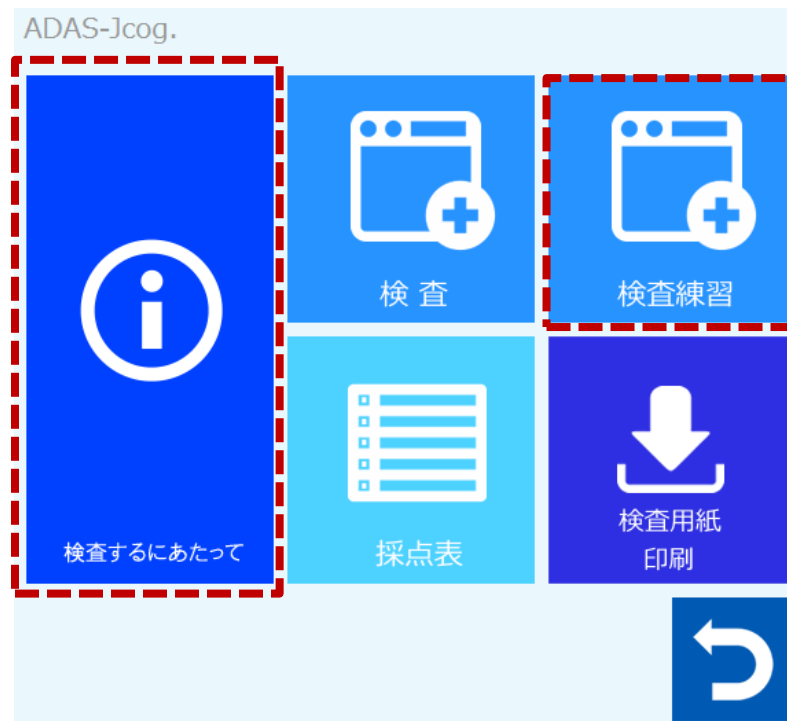

1. 事前に「検査するにあたって」を読みましょう。
2. 実施する前に「検査練習」をしましょう。

STEP3

SHINRI-ADASではさまざまな検査道具を用います。
検査道具が揃っているか、消耗品が足りているかを、事前にご確認ください。

検査①

口頭言語能力/言語の聴覚的理解/自発話における喚語困難

なし

検査②

単語再生

単語再生カード



単語再生

検査③

口頭命令に従う

時計・鉛筆・白い紙




物品呼称

検査④

高頻度物品：イス・自動車・はさみ・カナヅチ



中頻度物品：爪切り・くし・そろばん・筆

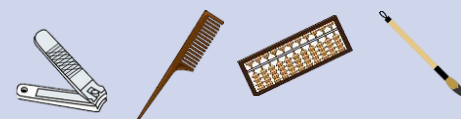

低頻度物品：タオル・手帳・指輪・扇子



構成行為

検査⑤

図形を書いてある紙・鉛筆



観念運動

検査⑥


便箋・封筒・切手
鉛筆・宛名・のり



単語再認 / 単語再認 / テスト教示の再生能力

検査⑧

単語再認カード

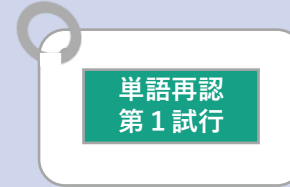

STEP4

各検査には「事前知識」「注意事項」「やりかた」のタブがあります。
「事前知識」と「注意事項」を必ずお読みください。

●自由会話を通して評価してください。

事前知識 注意事項 やりかた

口頭言語能力を評価するための事前知識

被検査者の言葉の明瞭さ、自分の言う事を他人に分らせるなど、発話の質的側面を全般的に評価し、量は評価しません。
被検査者の発話のみによって評価します。
発話の内容は評価の対象とせず、たとえ、失見当に基づく誤った内容の話が見られたとしても、それは評価に影響しません。

言語の聴覚的理解を評価するための事前知識

話された言葉を理解する能力を評価します。
口頭命令に対する反応は評価の対象としません。

自発話における喚語困難を評価するための事前知識

手指および物品呼称課題における反応は評価の対象としません。

質問数
0
推奨5~8質問

口頭言語 発話内容に一貫性がない、不明瞭である、とんちんかんである
カウントボタン 0 0
流畅だが意味不明 無言

聴覚的理解 尋ねたことの内容が分からない
カウントボタン 0 0
数回の繰り返しや言い換えが必要 時に正しく応答 まれにしか適切な反応を示さない

喚語困難 言うべき言葉が出てこない、または別の表現で置き換えて伝えようとする
カウントボタン 0 0
迂遠な表現や同義語での置き換えが顕著 他の語で置き換えない 意味のない発話、話の内容が空虚、1~2語による発話

前頁に戻る 中止その他

メモ

次の検査に進む

事前知識：検査項目に関する説明が書かれています。一度は必ず目を通してください。

注意事項：検査項目に関する注意点や補足が書かれています。一度は必ず目を通してください。

やりかた：実際の教示内容や手続きが書かれています。**検査実施時はこの画面で評価を行います。**

STEP5

アイコンについて


- 単語カードを使い評価してください。

事前知識 注意事項 やりかた

【第1試行】被検査者に教示してください。

 回答が得られた言葉については、ボタンをタッチして【○】にしてください。
回答がなくなったら、【完了】ボタンをタッチしてください。

 これから10個の言葉をお見せしますので、声に出して読みながら覚えて頂けますか？

 被検査者に「単語再生」カードを見せながら、1枚ずつ2秒間隔でめくってください。
お終いまでいったらカードを伏せてください。




 今読んだ言葉で、覚えているものを教えてください。

	犬	包丁	電車	野球	猫	鍋	飛行機	馬	水泳	自転車	合計	メモ
1試行	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	0	完了

前頁に
戻る

中止
その他

次の
検査に
進む

-  : 操作に関する説明が書かれています。
-  : 教示文が書かれています。
-  : 検査道具の使い方が書かれています。

検査の実施

STEP1

検査するにあたって

検査

検査練習

採点表

検査項目の詳細

「検査」をクリックします。

STEP2

検査者ログイン

検査者を選択し、パスワードを入力してください。

検査者

検査者識別コード 検査者を選択してください

パスワード

ログインしていません。

検査者を選択しパスワードを入力します。
ログインしている場合は表示されません。

STEP3

被検査者を選択して「決定」にタッチしてください。

検査者

検査者ID 501218

検査者識別コード 11111

DcDIDまたは被検査者ID

絞り込み

クリア

DcDID	被検査者ID	性別	生年月日	年齢	更新日
2	テスト被検査者	女性	1950/12/01	69歳	2019/05/29
525260	001	女性	1940/05/16	79歳	2019/05/16
525262	10101	女性	1931/04/06	88歳	2019/05/16
523883	20190101	女性	1950/01/01	70歳	2019/04/26

テスト検査として実施される場合の被検査者IDは「テスト被検査者」を選択してください。

被検査者を選択します。

STEP4

ADAS-Jcog

検査を始める前に

- まわりにカレンダー、時計はありませんか？
- 同伴している方の続柄は確認できていますか？
- 検査道具一式と筆記用具はそろっていますか？
- 検査道具のうち、消耗品
(「構成行為」の用紙、「観念運動」の便箋、封筒、切手)
は足りていますか？
- 前回使用した単語再生及び単語再認カードセット：標準セット

それでは始めましょう！

戻る 検査中止 単語セット変更 検査開始

検査を始める前の確認事項に問題がなければ「検査開始」をクリックします。

ADAS-Jcog

検査を始める前に

「単語再生及び単語再認で使用するカードセット」を選択してください。

標準セット

刺激セット1	刺激セット2
刺激セット3	刺激セット4
刺激セット5	刺激セット6

単語に慣れてしまうと正しい評価にならない可能性があります。
たまに単語を変えて評価を行う必要があります。

戻る 完了 検査開始

拡張機能をお申込みになった方のみに表示される機能です。

拡張機能をご希望の方は「お問い合わせフォーム」よりご連絡下さい。

検査① 口頭言語能力/言語の聴覚的理解/自発話における喚語困難

過去に実施した質問には日付が表示されます。

カウントボタンの個数を減らしたいときにクリックします。

メモが残せます。

The screenshot shows a web-based assessment interface. At the top, there are tabs for '知識', '注意事項', and 'やりかた'. Below these are tabs for '体調', '気分', '視聴覚', '利き手', '趣味', '生活歴', '現在の生活', and '検査当日'. A question is displayed: '2019 12/18 耳が聞こえにくい事がありますか?'. Below the question, there are three sections: '口頭言語' (Oral Language) with a count of 0, '聴覚的理解' (Auditory Comprehension) with a count of 1, and '喚語困難' (Spontaneous Utterance Difficulty) with a count of 1. Each section has a 'カウントボタン' (Count Button) with a downward arrow. To the right of these sections are evaluation options: '発話内容(内容性が低い、不明瞭である、とんちんかんである)' with '流暢だが意味不明' and '無言'; '尋ねたことの内容が分からない' with '数回の繰り返しや言い換えが必要', '時に正しく応答', and 'まれにしか適切な反応を示さない'; and '言うべき言葉が出てこない、または別の表現で置き換えて伝えようとする' with '迂遠な表現や同義語での置き換えが顕著', '他の語で置き換えない', and '意味のない発話、話の内容が空虚、1~2語による発話'. There are also buttons for 'メモ' (Memo) and '次の検査に進む' (Next Assessment). On the left, there is a '質問数' (Number of Questions) section showing '5' and '推奨5~8質問' (Recommended 5-8 questions). There are also buttons for '前頁に戻る' (Return to Previous Page) and '中止その他' (Stop/Other).

クリックした質問の数が反映されます。質問数が推奨の「5」以上になると文字色が黒から青に変わり、次の検査に進めるようになります。

1. 「やりかた」タブを選択します。
2. 「体調」～「検査当日」の8領域の質問が用意されています。適切と思われる質問を選んでクリックし、その質問を読みます。
3. その質問に対して「口頭言語」「聴覚的理解」「喚語困難」の問題が見られたら、それぞれ1回カウントボタンをクリックします。
4. 上記2.3.の手続きを繰り返し、質問を5～8個行います。5個以上にならないと次に進めません。
5. 右側のボタンは、顕著な問題が見られた時にクリックします。
6. 評価が完了したら「次の検査に進む」をクリックします。

検査② 単語再生

- 単語カードを使い評価してください。

1 試行目

事前知識 注意事項 **やりかた**

【第1試行】被検査者に教示してください。

🔊 回答が得られた言葉については、ボタンをタッチして【○】にしてください。
回答がなくなったら、【完了】ボタンをタッチしてください。

👉 これから10個の言葉をお見せしますので、声に出して読みながら覚えて頂けますか？

🔄 被検査者に「単語再生」カードを見せながら、1枚ずつ2秒間隔でめくってください。
お終いまでいったらカードを伏せてください。

👉 今読んだ言葉で、覚えているものを教えてください。

	犬	包丁	電車	野球	猫	銅	飛行機	馬	水泳	自転車	合計		
1試行	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	完了	メモ

前頁に戻る 中止その他 次へ進む

1. 単語再生カードを準備します。

※カードが単語再生のものであることを確認しましょう。

1. 「やりかた」の画面に沿って1試行目をを行います。
2. 正しく言えた単語は、×を押して○にします。
3. 回答が出なくなったら「完了」をクリックします。

2 試行目

3 試行目

- 単語カードを使い評価してください。

事前知識 注意事項 やりかた

【第3試行】被検査者に教示してください。

🔊 回答が得られた言葉については、ボタンをタッチして【○】にしてください。
回答がなくなったら、【完了】ボタンをタッチしてください。

👉 最後にもう一度、声に出して読みながら覚えていただけますか？

🔄 被検査者に「単語再生」カードを見せながら、1枚ずつ2秒間隔でめくってください。
お終いまでいったらカードを伏せてください。

👉 今読んだ言葉で、覚えているものを教えてください。

	犬	包丁	電車	野球	猫	銅	飛行機	馬	水泳	自転車	合計		
1試行	○	×	○	×	○	○	×	○	×	○	6	完了	メモ
2試行	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	8	完了	メモ
3試行	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	9	完了	メモ

前頁に戻る 中止その他 次へ進む

1. 同じように2試行目、3試行目をを行います。それぞれ教示文が少し変わります。その他の手続きは同様です。
2. 3試行とも完了したら、「次の検査に進む」をクリックします。

検査③ 口頭命令に従う

● 口頭言語の聴覚的理解力を評価してください。

事前知識 注意事項 **やりかた**

被検査者に教示してください。

- 各段階の指示に従えたら【○】ボタン、指示に従えない場合は【×】ボタンをタッチしてください。
- これから、私の言った通りの動作をしてください。
例えば、「手を上げてください」と言いましたら、このように(実際に手を上げる)手を上げてください。
私が最後まで言い終わってから、動作を始めるようにしてください。
- 第1段階 **こぶし**を握ってください。
- 第2段階 **天井**を指差し、次に**床**を指差ししてください。
- 第3段階 **目を閉じたまま 2本の指で 両方の肩を 2度**ずつたたいてください。
- 鉛筆、時計、白い紙をこの順番で被検査者の前の机の上に並べて、指示を続けてください。
- 第4段階 **鉛筆**を**白い紙の上**に置き、次に**もとに戻し**てください。
- 第5段階 **時計**を**鉛筆の反対側**に置き、**白い紙を裏返**してください。

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

メモ

前頁に
戻る

中止
その他


次の
検査に
進む

- 「やりかた」に沿って、各段階について評価していきます。
第4段階、第5段階では時計・鉛筆・白い紙を使います。
- 赤が反転している動作ができれば○を、できなければ×をクリックします。
- 赤の反転が複数ある段階は、そのすべてができた場合にのみ○となります。

● 口頭言語の聴覚的理解力を評価してください。

事前知識 注意事項 **やりかた**

口頭命令課題における物品の配置図

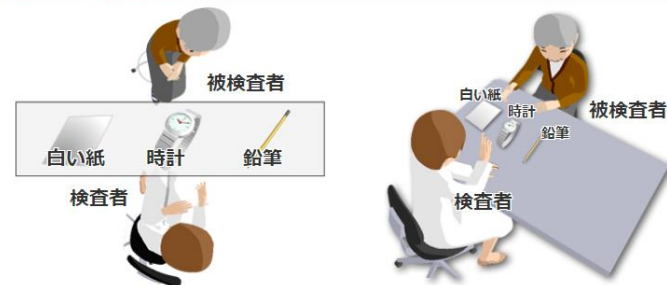

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

メモ

前頁に
戻る

中止
その他

次の
検査に
進む

* 第4段階と第5段階の物品の置き方は、注意事項をご参照ください。

検査④ 手指および物品呼称

● 手指および物品呼称を評価してください。

事前知識 注意事項 **やりかた**

正解の場合は【○】ボタン、誤反応の場合は【×】ボタンをタッチしてください。
回答内容を直接記入したい場合には【メモ】ボタンをタッチして、画面に手書きで記入してください。

被検査者の利き手の5指に1本ずつ触れながら質問をしてください。

これはなにに指ですか？

12個の物品を1つずつ、触れさせないように提示して質問をしてください。

物品を1つずつ被検査者に提示してください。
見せるだけでは被検査者が分からない場合には、触れさせながら質問をしてください。

これは何ですか？

手指	高頻度物品	中頻度物品	低頻度物品
親指	イス	爪切り	タオル
人差し指	自動車	くし	手帳
中指	はさみ	そろばん	指輪
薬指	カナヅチ	筆	扇子
小指			

前頁に 戻る

中止 その他

メモ

次の検査に 進む

1. 物品呼称の道具を準備します。
2. 「やりかた」の画面に沿って、「手指」→「高頻度物品」→「中頻度物品」→「低頻度物品」の順に、ブロック毎に評価していきます。同じブロック内の提示は、どのような順序で行っても構いません。

※回答の正誤の判断に迷ったら「注意事項」を参照してください。

検査⑤ 構成行為

- 図形を模写する能力を評価してください。

事前知識 注意事項 **やりかた**

被検査者に図の書かれた紙を提示した後、教示してください。

正解、不正解の例を見たい場合には【例】ボタンをタッチしてください。
正解の場合は【×】ボタンをタッチして、【○】に変えてください。

被検査者に図の書かれた紙と鉛筆を提示してください。

この図形が見えますか？
この紙のどこでもよいですから、同じ図形を書いてください。

○ × × × ×

なぞり書き 囲い込み なし
未記入 なぐり書き 単語記入 なし

前頁に 戻る 中止 その他

メモ

次の検査に 進む

正解例 正解例 正解例 正解例

1. 図形が印刷された用紙と鉛筆を準備します。
2. 「やりかた」に沿って、左の図から順に1つずつ図形描画を行います。
3. なぞり書き・囲い込み、未記入・なぐり書き・単語記入があった場合は、該当するボタンをクリックします。

※図形の書き直しは、自発的な場合のみ2回まで可とします。

※正誤の判断に迷う場合は正解例をご参照ください。

検査⑥ 観念運動

● 観念運動能力を評価してください。

事前知識 注意事項 やりかた

被検査者に部分教示してください。

出来た場合には【○】ボタンをタッチし、出来なかった場合には【×】ボタンをタッチしてください。

- 便箋を折りたたんでください。
便箋を封筒に入れてください。
封筒に封をしてください。
封筒に宛名を書いてください。
封筒に切手を貼ってください。

一括教示

部分教示

便箋を折りたたむ

便箋を封筒に入れる

封筒に封をする

封筒に宛名を書く

封筒に切手を貼る

完了

メモ

完了

再教示した

再教示しなかった

再教示した

メモ

メモ

メモ

メモ

前頁に戻る

中止その他

次の検査に進む

部分教示なしにできた場合は、「再教示した」をクリックして「再教示しなかった」にします。

1. 観念運動の道具を準備します。
2. 「やりかた」の画面に沿って、まず「一括教示」をし、自発的にどこまでできるかを評価します。できた動作には○、できなかった動作には×をクリックして記録します。すべて評価したら「完了」をクリックします。
3. 一括教示ではできない動作があった場合、部分教示の入力欄が表示されます。そこで、各動作について個別に教示する「部分教示」に移り、部分教示があればできるかどうかを○×で記録します。

※正誤の判断は、日本の郵便制度で届くかどうかを基準にします。

- 現在の状況を答えられるか評価してください。

事前知識	注意事項	やりかた
<p>👉 回答が正しい場合には【○】ボタンをタッチし、間違っている場合には【×】ボタンをタッチしてください。 回答に関するメモを残したい場合には、【メモ】ボタンをタッチして、画面に手書きで記入してください。</p> <p>被検査者に質問してください。</p>		
👉	今年は何年ですか？	【模範解答】(令和2年) 西暦2020年
	今月は何月ですか？	1月
	今日は何日ですか？	7日
	今日は何曜日ですか？	火曜日
	今は何時ですか？	15:26、15時、14時、16時、3時
	今の季節は何ですか？	
	今いる場所は何処ですか？	
	今日一緒にいらっしやった人は誰ですか？	

	年	月	日	曜日	時間	季節	場所	人物	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	メモ
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	メモ	メモ	メモ	メモ	メモ	メモ	メモ	メモ	次の検査に進む

前頁に
戻る

中止
その他

- ・ 「やりかた」に沿って評価していきます。
- ※日には、±1日まで許容範囲とされています。
- ※時間は、±1時間程度まで許容範囲とされています。
- ※季節は、施設内で統一してご評価ください。
- ※人物は、続柄を正しく答えられればよいとされています。

検査⑧ 単語再認/テスト教示の再生能力

- 単語再認/教示再生能力を評価してください。

事前知識 注意事項 やりかた

【第1試行】被検査者に教示してください。

④ それぞれの言葉について「あった」と答えたら【あった】ボタンを、「なかった」と答えたら【なかった】ボタンを、「無回答/わからない」場合は【無回答】ボタンをそれぞれタッチしてください。

④ 「単語再認」カードを被検査者に提示してください。

④ これから 12個の言葉を見せますので、声を出して読んでください。そして12個の言葉を覚えてください。

④ 被検査者が読み終わりましたら、「単語再認」カードを伏せ、「単語再認 第1試行」カードを被検査者に提示して教示してください。

④ では、別の言葉の束をお見せします。これから見ていただく言葉が、今読んで覚えていただいた言葉の中にあったか、なかったかを、教えてください。この言葉は今読んだ言葉の中にありましたか？

ベンチ	松	冷蔵庫	ぶどう	さる	アイロン
花瓶	汽車	洗面器	牛	額	ライオン
物さし	ベッド	うめ	乗馬	かばん	テーブル
オートバイ	ほうき	つくえ	ボール	本箱	コップ

再生能力

第1試行

あった

なかった

無回答

教示

0

メモ

次の検査に進む

前頁に戻る

中止その他

いずれかのボタンをクリックするとピンク色になっている単語にその内容が入力されます。

1. 「単語再認カード」と「単語再認 第1 試行カード」を準備します。
2. 「やりかた」に沿って1 試行目を行います。
「単語再認」カードを一通り読み終えたらカードを伏せ、今度は「単語再認 第1 試行」カードの言葉が、今読んだ言葉の中にあったかなかったかを、ひとつずつ尋ねていきます。
これに対する回答を「あった」「なかった」「無回答」いずれかのボタンをクリックして入力します。
3. 1 番目・2 番目の単語の教示と、3 番目以降の単語の教示とは異なるので、注意します。

検査⑧ 単語再認/テスト教示の再生能力

- 単語再認/教示再生能力を評価してください。

事前知識 注意事項 やりかた

【第1試行】被検査者に教示してください。

🔊 これはどうですか？

🔊 被検査者が教示を忘れた場合、【再教示】ボタンをタッチし、「この言葉は今読んで覚えていただいた言葉の中にあつたか、なかつたかを教えてください」と被検査者に語りかけてください。

「再教示」ボタン

	ベンチ	松	冷蔵庫	ぶどう	さる	アイロン	
	あつた	なかつた	あつた	なかつた	なかつた	なかつた	第1試行
再生能力	花瓶	汽車	洗面器	牛	額	ライオン	あつた
	なかつた	なかつた	なかつた	なかつた	なかつた	なかつた	↑再教示 1
	物さし	ベッド	うめ	乗馬	かばん	テーブル	なかつた
	なかつた	なかつた	なかつた	なかつた	なかつた	あつた	メモ
	オートバイ	ほうき	つくえ	ボール	本箱	コップ	無回答
	なかつた	なかつた	あつた	なかつた	なかつた	なかつた	完了

前頁に戻る 中止 その他 次の検査に進む

1. 3番目以降の単語では、簡単な教示のみで回答を聞いていきます。もしも教示内容が分からなくなっている様子が見られたら、そのたびに再教示をし、「再教示」ボタンを1回ずつクリックします。
2. 24個の単語すべての回答を入力したら「完了」をクリックします。
3. 画面が次の試行画面に切り替わります。2試行目は「単語再認カード」と「単語再認 第2試行カード」を用いて、3試行目は「単語再認カード」と「単語再認 第3試行カード」を用いて、同様に実施します。それぞれ教示文が少し異なりますが、その他の手続きは同様です。

※それぞれ1番目と2番目の単語の教示と、3番目以降の単語の教示とは、異なることに注意してください。


4. 試行をすべてを完了すると、検査は終了です。お疲れ様でした！

検査結果の表示

施行日	令和2年1月7日	検査場所	日本テクトシステムズ株式会社	検査者	11111	合計得点 18.0/70	
生年月日	昭和6年4月6日	年齢	88歳	性別	女		被検査者
項目	評価基準					得点	
単語再生	正解数： 1試行： <input type="text" value="6"/> 2試行： <input type="text" value="8"/> 3試行： <input type="text" value="9"/>					2.3	
口頭言語能力	0: 全く支障なし 1: ごく軽度 2: 軽度 3: 中等度 4: やや高度 5: 高度					0	
言語の聴覚的理解	0: 全く支障なし 1: ごく軽度 2: 軽度 3: 中等度 4: やや高度 5: 高度					0	
自発話における喚語困難	0: 全く支障なし 1: ごく軽度 2: 軽度 3: 中等度 4: やや高度 5: 高度					0	
口頭命令に従う	従えた命令の数： <input type="text" value="3"/>					2	
手指および物品呼称	不正解の数： <input type="text" value="0"/> : 0~2 <input type="text" value="1"/> : 3~5 <input type="text" value="2"/> : 6~8 <input type="text" value="3"/> : 9~11 <input type="text" value="4"/> : 12~14 <input type="text" value="5"/> : 15~17					0	
構成行為	不正解な図形の数： 0: 0(すべて正解) 1: 1図形のみ 2: 2図形 3: 3図形 4: 4図形または なぞり書き、囲い込み 5: 書かれていない					4	
観念運動	一括教示で達成できた動作の数： <input type="text" value="4"/>					1	
見当識	正解数： <input type="text" value="5"/>					3	
単語再認	正解数： 1試行： <input type="text" value="4"/> 2試行： <input type="text" value="7"/> 3試行： <input type="text" value="8"/>					5.7	
テスト教示の再生能力	0: 全く支障なし 1: ごく軽度 2: 軽度 3: 中等度 4: やや高度 5: 高度					0	
<input type="text" value="メモ"/>							
				<input type="button" value="採点表を印刷する"/>		<input type="button" value="メニューに戻る"/>	


採点表ボタンから
いつでも印刷できます

全ての検査を完了すると検査結果（採点表）が表示されます。
採点表を印刷する場合は「採点表を印刷する」をクリックします。
そのまま終了する場合は「メニューに戻る」をクリックします。

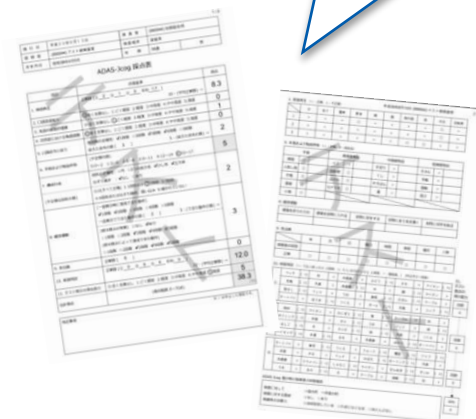

治療経過グラフ、結果報告書の表示

STEP1

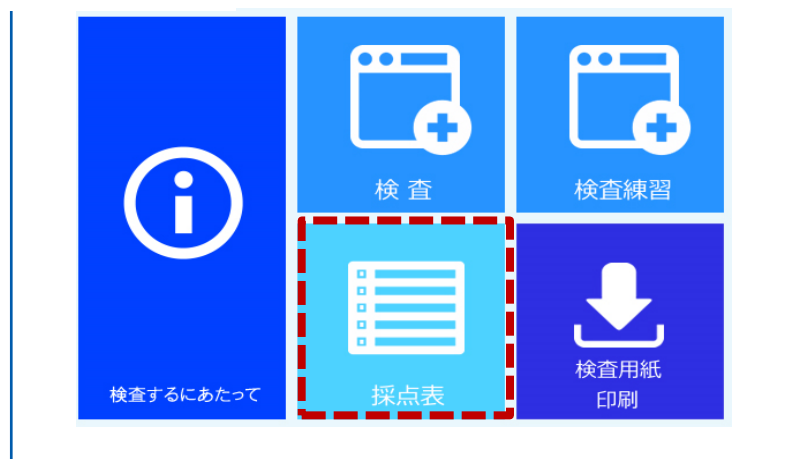

これまでの検査結果を見るには、メインメニューの「採点表」ボタンをクリックします。

STEP2

検査者ログイン

検査者を選択し、パスワードを入力してください。

検査者

検査者識別コード [500001] 1111

パスワード ****

決定

ログインしていません。

「検査者識別コード」を選択し、パスワードを入力して決定ボタンをクリックします。
ログインしている場合は表示されません。

STEP3

被検査者を選択して「決定」にタッチしてください。

検査者

検査者ID 501218

検査者識別コード 11111

DcDIDまたは被検査者ID

絞り込み クリア

	DcDID	被検査者ID	性別	生年月日	年齢	更新日
<input type="radio"/>	2	テスト被検査者	女性	1950/12/01	69歳	2019/05/29
<input type="radio"/>	525260	001	女性	1940/05/16	79歳	2019/05/16
<input type="radio"/>	525262	10101	女性	1931/04/06	88歳	2019/05/16
<input type="radio"/>	523883	20190101	女性	1950/01/01	70歳	2019/04/26

テスト検査として実施される場合の被検査者IDは「テスト被検査者」を選択してください。

結果を見たい被検査者を選択します。

STEP4

選択した被検査者の検査結果一覧が表示されます。

結果の詳細を確認する



各検査の「表示」ボタンクリックで、結果の詳細が閲覧できます。
検査終了後に表示される採点表です。

ADAS-Jcog.

(令和2年) 2020年10月20日 (火) 13:13

採点表一覧

生年月日: 昭和25年12月1日 | 年齢: 69歳 | 性別: 女 | 被検査者: テスト被検査者

施行日	検査者	合計得点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	結果	
表示	令和2年10月1日	初期設定用	51	10	5	5	5	5	5	0	4	7	0	一部スキップ	
表示	平成30年11月14日	12345	16.7	5	0	0	0	1	0	5	1	0	4.7	完了	
表示	平成30年8月21日	初期設定用	70	10	5	5	5	5	5	5	8	12	5	中止	
表示	平成30年7月11日	初期設定用	47.3	7.3	0	0	0	5	5	4	1	8	12	5	一部スキップ
表示	平成30年7月9日	初期設定用	30.7	10	1	1	1	5	2	2	1	7	0.7	0	一部スキップ
表示	平成30年7月9日	初期設定用	48.3	5.3	1	0	0	2	5	5	5	8	12	5	一部スキップ
表示	平成30年7月8日	初期設定用	70	10	5	5	5	5	5	5	8	12	5	中止	
表示	平成30年7月8日	初期設定用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	中断	
表示	平成30年7月4日	初期設定用	70	10	5	5	5	5	5	5	8	12	5	中止	
表示	平成30年6月29日	初期設定用	70	10	5	5	5	5	5	5	8	12	5	中止	
表示	平成29年4月4日	初期設定用	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	完了	
表示	平成28年2月8日	初期設定用	6.4	0.7	0	0	0	0	1	1	0	1.7	0	完了	

治療経過グラフ


被検査者の
選択に戻る

「治療経過グラフ」へ

経時変化、予測曲線、結果報告書の閲覧ができます
p50

STEP5

「治療経過グラフ」は、
これまで実施した検査得点を元に経時
変化をグラフ表示します。

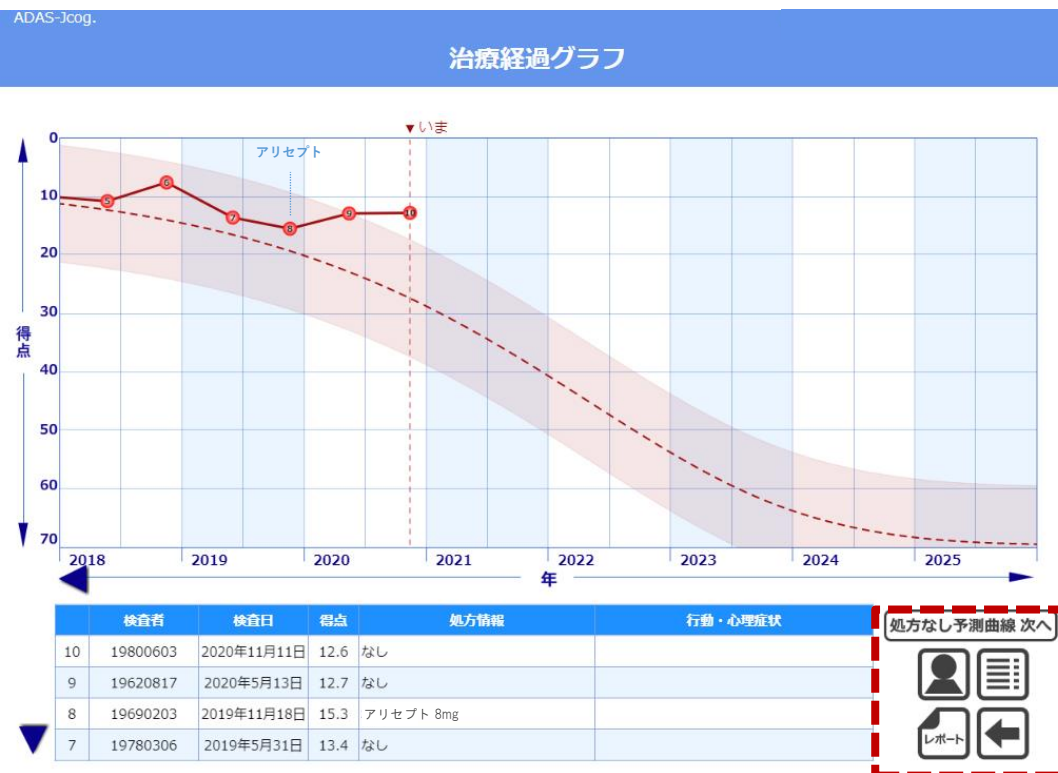

処方なし予測曲線 次へ

処方なし予測曲線の開始点の移動ができます



被検査者情報の確認ができます



ADAS-Jcog. 実施結果報告書が確認できます
p51



予測曲線の根拠の確認ができます




前の画面に戻ります

STEP6

「検査報告書」は、
治療経過グラフと各検査の得点（下位尺度を含む）をまとめて表示します。
印刷することもできます。

「治療経過グラフ」の  クリックで閲覧できます。

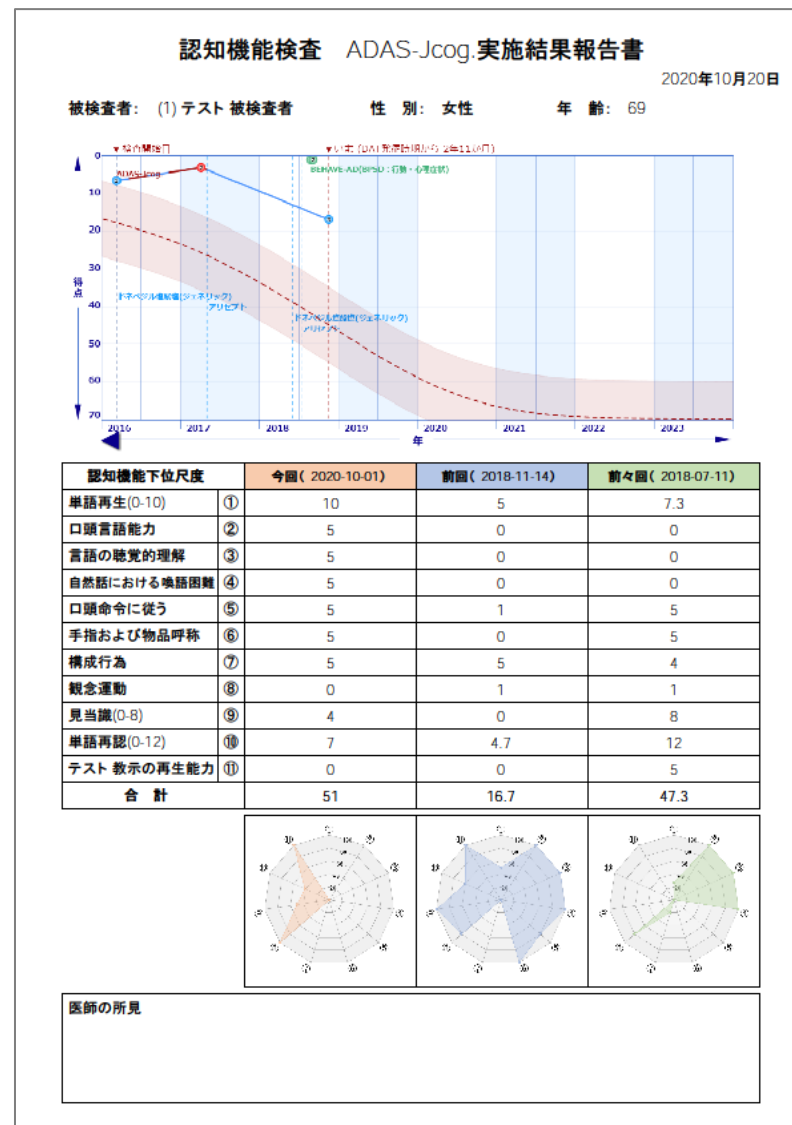

分析 データエクスポート

分析：採点表の表示

STEP1



「分析」をクリックします。

STEP2



今までの採点表を表示します。

ご利用のプランが「Aプラン（オプションなし）」の場合、HDS-R、BEHAVE-ADは最新の結果のみ表示します。

AプランでHDS-R、BEHAVE-ADの過去の結果を表示するには、データ管理オプションへの加入が必要です。
詳しくは「SHINRIシリーズマニュアル SHINRI-HASEGAWA・SHINRI-BEHAVE」をご参照ください。

分析：一括グラフ表示

STEP1→STEP2

分析メニュー



採点表一覧 **グラフ表示** データエクスポート

「分析」→「グラフ表示」をクリックします。

STEP3

被検査者を選択して「決定」にタッチしてください。

検査者ID 501218
検査者識別コード 11111

DcDIDまたは被検査者ID 絞り込み

DcDID	被検査者ID	性別	生年月日	年齢	更新日
2	テスト被検査者	女性	1950/12/01	69歳	2019/05/29
525260	001	女性	1940/05/16	79歳	2019/05/16
525262	10101	女性	1931/04/06	88歳	2019/05/16
523883	20190101	女性	1950/01/01	70歳	2019/04/26

被検査者を選択して「決定」をクリックします。

STEP4

検査得点

グラフ表示メニュー



検査得点 検査得点(下位尺度) 比較

検査得点メニュー



HDS-R BEHAVE-AD ADAS-Jcog.


重ねて表示

検査毎に、得点の経時変化を表示します。

※「重ねて表示」は、全ての検査結果を1つのグラフに表示します。データ管理オプションに加入している場合にご利用いただけます。

HDS-R、BEHAVE-ADの経時変化の表示は、データ管理オプションに加入している場合にご利用いただけます。詳しくは「SHINRIシリーズマニュアル SHINRI-HASEGAWA・SHINRI-BEHAVE」をご参照ください。

STEP5 検査得点（下位尺度）

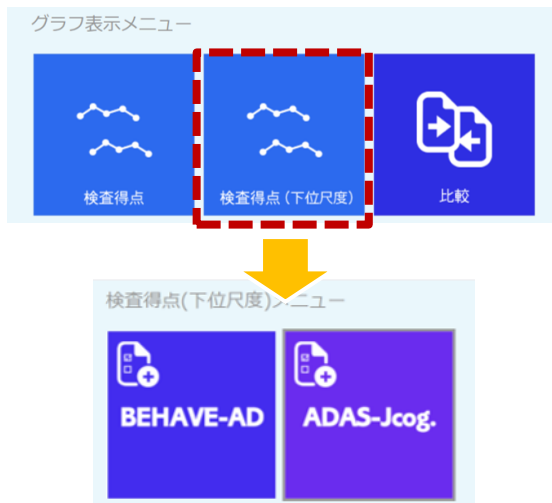

下位尺度の経時変化を表示します。

【サンプル】



STEP6 比較




背景情報による検査結果の比較ができます。

【比較対象項目】

比較対象項目				
統計対象	性別	家族	喫煙	飲酒
<input checked="" type="checkbox"/> 全例	<input checked="" type="checkbox"/> 男	<input checked="" type="checkbox"/> 同居	<input checked="" type="checkbox"/> しない	<input checked="" type="checkbox"/> しない
<input checked="" type="checkbox"/> 施設	<input checked="" type="checkbox"/> な	<input checked="" type="checkbox"/> 施設	<input checked="" type="checkbox"/> 1日1箱未満	<input checked="" type="checkbox"/> 2ホケリ
			<input checked="" type="checkbox"/> 1日1箱以上	<input checked="" type="checkbox"/> 毎日
薬剤	血圧	血糖値	コレステロール値	
<input checked="" type="checkbox"/> アリセプト	<input checked="" type="checkbox"/> 収縮圧	<input checked="" type="checkbox"/> 収縮値	<input checked="" type="checkbox"/> 低コレステロール	
<input checked="" type="checkbox"/> メマリー	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	
<input checked="" type="checkbox"/> リバスタット	<input checked="" type="checkbox"/> 高血圧	<input checked="" type="checkbox"/> 境界型糖尿病	<input checked="" type="checkbox"/> 高コレステロール血症(中)	
<input checked="" type="checkbox"/> 無投薬		<input checked="" type="checkbox"/> 糖尿病	<input checked="" type="checkbox"/> 高コレステロール血症(高)	

HDS-R、BEHAVE-ADのデータ表示は、データ管理オプションに加入している場合にご利用いただけます。詳しくは「SHINRIシリーズマニュアル SHINRI-HASEGAWA・SHINRI-BEHAVE」をご参照ください。

STEP1→STEP2

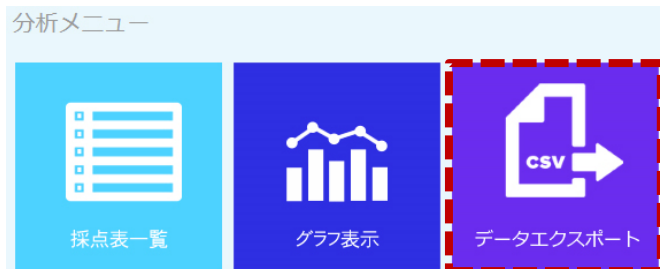

「分析」→「データエクスポート」をクリックします。

STEP3



月ごとのデータを
CSV形式でダウンロードできます。
PCなどをご利用ください。

【サンプル】

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	OCDID	被検査者I 性別	生年月日	検査者ID	検査者種別	実施日	結果	会計得点		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	500494	824 女性	1981/2/10	3	初期設定F	2021/2/8	完了	22		5	0	0	0	3	3	2	2	2	5	0

SHINRI-HASEGAWA、SHINRI-BEHAVEのデータダウンロードは、データ管理オプションに加入している場合にご利用いただけます。

詳しくは「SHINRIシリーズマニュアル SHINRI-HASEGAWA・SHINRI-BEHAVE」をご参照ください。

お問い合わせ

お問い合わせフォーム



The screenshot shows a dashboard with a grid of buttons. The '管理' (Management) button is highlighted with a red dashed border. To the right is a 'お知らせ' (Notice) section with a list of announcements and '読む' (Read) buttons.

「管理」 → 「お問い合わせ」 → 「お問い合わせ」とクリックします。

お問い合わせ

メールアドレス

お名前

内容

キャンセル 確認画面へ進む

お問合せフォームにご記入いただけます。

契約内容、お支払いに関するご質問、ご不明点は、
下記へお問い合わせください。

日本テクトシステムズ(株)
TEL 03-6452-9893 (代表)
東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号
渋谷マークシティ ウエスト16階

システムの操作方法や修正などに関するご質問、ご不明点は、
下記へお問い合わせください。

TEL 080-4410-7859 (技術担当)