

分析 データエクスポート

分析：採点表の表示

STEP1



「分析」をクリックします。

STEP2



今までの採点表を表示します。

ご利用のプランが「Aプラン（オプションなし）」の場合、HDS-R、BEHAVE-ADは最新の結果のみ表示します。

AプランでHDS-R、BEHAVE-ADの過去の結果を表示するには、データ管理オプションへの加入が必要です。
詳しくは「SHINRIシリーズマニュアル SHINRI-HASEGAWA・SHINRI-BEHAVE」をご参照ください。

分析：一括グラフ表示

STEP1→STEP2

分析メニュー



採点表一覧 **グラフ表示** データエクスポート

「分析」→「グラフ表示」をクリックします。

STEP3

被検査者を選択して「決定」にタッチしてください。

検査者ID 501218
検査者識別コード 11111

DcDIDまたは被検査者ID 絞り込み

| DcDID | 被検査者ID | 性別 | 生年月日 | 年齢 | 更新日 |
|--------|----------|----|------------|-----|------------|
| 2 | テスト被検査者 | 女性 | 1950/12/01 | 69歳 | 2019/05/29 |
| 525260 | 001 | 女性 | 1940/05/16 | 79歳 | 2019/05/16 |
| 525262 | 10101 | 女性 | 1931/04/06 | 88歳 | 2019/05/16 |
| 523883 | 20190101 | 女性 | 1950/01/01 | 70歳 | 2019/04/26 |

被検査者を選択して「決定」をクリックします。

STEP4

検査得点

グラフ表示メニュー



検査得点 検査得点(下位尺度) 比較

検査得点メニュー



HDS-R BEHAVE-AD ADAS-Jcog.


重ねて表示

検査毎に、得点の経時変化を表示します。

※「重ねて表示」は、全ての検査結果を1つのグラフに表示します。データ管理オプションに加入している場合にご利用いただけます。

HDS-R、BEHAVE-ADの経時変化の表示は、データ管理オプションに加入している場合にご利用いただけます。詳しくは「SHINRIシリーズマニュアル SHINRI-HASEGAWA・SHINRI-BEHAVE」をご参照ください。

STEP5 検査得点（下位尺度）

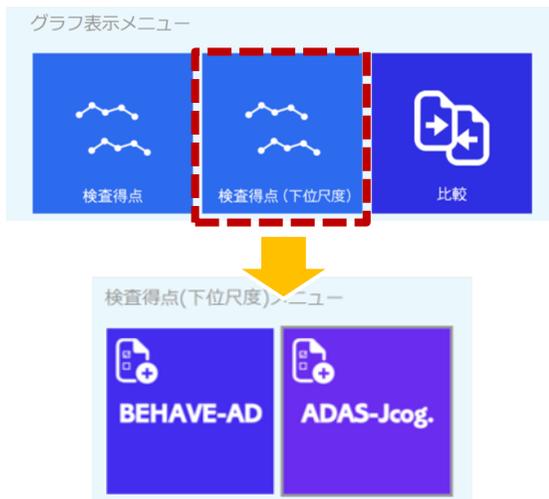

下位尺度の経時変化を表示します。

【サンプル】



STEP6 比較



背景情報による検査結果の比較ができます。

【比較対象項目】

| 比較対象項目 | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 統計対象 | 性別 | 家族 | 喫煙 | 飲酒 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 全例 | <input checked="" type="checkbox"/> 男 | <input checked="" type="checkbox"/> 同居 | <input checked="" type="checkbox"/> しない | <input checked="" type="checkbox"/> しない |
| <input checked="" type="checkbox"/> 施設 | <input checked="" type="checkbox"/> な | <input checked="" type="checkbox"/> 施設 | <input checked="" type="checkbox"/> 1日1箱未満 | <input checked="" type="checkbox"/> 2ホヱキ |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> 1日1箱以上 | <input checked="" type="checkbox"/> 毎日 |
| 薬剤 | 血圧 | 血糖値 | コレステロール値 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> アリセプト | <input checked="" type="checkbox"/> 高血圧 | <input checked="" type="checkbox"/> 糖尿病 | <input checked="" type="checkbox"/> 低コレステロール | |
| <input checked="" type="checkbox"/> メマリー | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> リバスタッチ | <input checked="" type="checkbox"/> 高血圧 | <input checked="" type="checkbox"/> 境界型糖尿病 | <input checked="" type="checkbox"/> 高コレステロール血症 (中) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 無投薬 | | <input checked="" type="checkbox"/> 糖尿病 | <input checked="" type="checkbox"/> 高コレステロール血症 (高) | |

HDS-R、BEHAVE-ADのデータ表示は、データ管理オプションに加入している場合にご利用いただけます。詳しくは「SHINRIシリーズマニュアル SHINRI-HASEGAWA・SHINRI-BEHAVE」をご参照ください。

STEP1→STEP2



「分析」→「データエクスポート」をクリックします。

STEP3



月ごとのデータを
CSV形式でダウンロードできます。
PCなどをご利用ください。

【サンプル】

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|--------|----------|-----------|---------|----------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | OCDID | 被検査者I 性別 | 生年月日 | 検査者ID | 検査者実施日 | 結果 | 会計得点 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 500494 | 824 女性 | 1981/2/10 | 3 初期設定F | 2021/2/8 | 完了 | 22 | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |

SHINRI-HASEGAWA、SHINRI-BEHAVEのデータダウンロードは、データ管理オプションに加入している場合にご利用いただけます。
詳しくは「SHINRIシリーズマニュアル SHINRI-HASEGAWA・SHINRI-BEHAVE」をご参照ください。